


Triturador de Osso com Guia para Branemark System® Instruções de Uso



GMT42042. Impresso no Brasil. Data de impressão 24/07/2015.
Todos os direitos reservados. A Nobel Biocare, o logotipo da Nobel Biocare e todas as outras marcas comerciais utilizadas neste documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou caso isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare.
As imagens de produtos não estão necessariamente em escala.

**Triturador de Osso
Branemark System® RP**

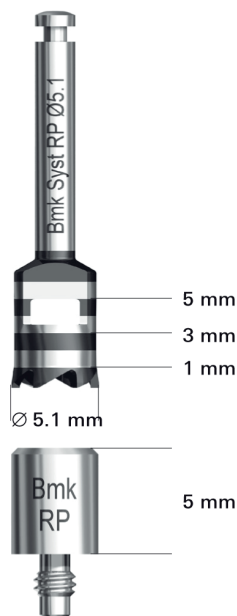

**Guia para Triturador de Osso
Branemark System® RP**

Instruções de uso

Procedimento

Para facilitar a remoção do tecido duro e mole em torno da cabeça do implante, pode utilizar o Triturador de Osso com guia. O Triturador de Osso e a guia podem ser ambos utilizados manualmente (Cabo para Instrumentos Mecânicos) ou através da máquina de perfuração.

Procedimento:

1. Se aplicável, retire o parafuso de cobertura ou o pilar de cicatrização.
2. Coloque a Guia para Triturador de Osso no implante e aperte-a utilizando a chave Unigrip™.
3. Coloque o Cabo para Instrumentos Mecânicos para utilização manual do Triturador de Osso ou prenda-o à peça de mão. Antes de iniciar a máquina, coloque o Triturador de Osso na respectiva guia e ligue-a, utilizando apenas baixa velocidade. Recomenda-se uma irrigação abundante.

Atenção:

Certifique-se de que não é aplicada nenhuma força de flexão ao utilizar o Triturador de Osso.

4. Quando o osso circundante próximo da plataforma do implante estiver suficientemente reduzido, conecte o pilar. Certifique-se de que a plataforma do implante não tenha restos de osso. Pode utilizar as marcas de altura no Triturador de Osso como orientação para a seleção do pilar em relação à altura do colo do implante.

As marcas começam 1 mm a partir da plataforma do implante (consulte a imagem).

A janela na parte superior do Triturador de Osso facilita o exame visual quando o instrumento está totalmente encaixado na guia.

Indicações

NP – para utilização com todos os implantes Branemark System® e NobelSpeedy® Groovy NP.

RP – para utilização com todos os implantes Ø de 3.75 mm RP e Ø de 4.0 mm RP Branemark System® MkIII e NobelSpeedy® Groovy.

WP – para utilização com todos os implantes Ø de 5.0 mm WP Branemark System® e NobelSpeedy® Groovy.

Atenção

A utilização de Trituradores de Osso com implantes RP MkIV e WP Ø 6 não é recomendada.

A parte superior destes implantes será riscada se o Triturador de Osso ficar totalmente encaixado na guia. Esta situação deve-se ao fato dos ombros serem mais largos do que a interface pilar-implante.

Contraindicações

Utilize apenas cada Guia do Triturador de Osso com a respectiva dimensão de implantes mencionada anteriormente, pois de outro modo podem ocorrer danos na cabeça do implante e nas roscas internas.

Fabricante:



Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26, Västra Hamngatan 1, 411 17, Gotemburgo, Suécia - Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52.
Nobel Biocare USA LLC, 22715 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887-4609 - EUA - Telefone: 1 714 282 4800. Fax: 1 714 998 9236.

Responsável Técnico:

Andréa M. Garcia
CRF/SC 6569
Reg. ANVISA:
10064010233 10064010214
10064010223 10064010225

Importador:

KaVo do Brasil, Indústria e Comércio LTDA
Rua Chapecó, 86 - Joinville - SC
CEP: 89221-040 - Tel.: (47) 3451-0100

Atenção: A venda deste dispositivo só pode ser efetuada para cirurgiões dentistas licenciados ou mediante receita médica devidamente carimbada e assinada pelo cirurgião dentista responsável.

www.nobelbiocare.com