

Torquímetro Manual Cirúrgico NobelReplace® Torquímetro Manual Cirúrgico Brånemark System®

Instruções de Uso - Aplicação cirúrgica






Ref. 10120141

Ed.03 - 11.2017

GMT40857. Impresso no Brasil. Data de impressão 22/04/2015.

Todos os direitos reservados. A Nobel Biocare, o logotipo da Nobel Biocare e todas as outras marcas comerciais utilizadas neste documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou caso isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare.

As imagens de produtos não estão necessariamente em escala.

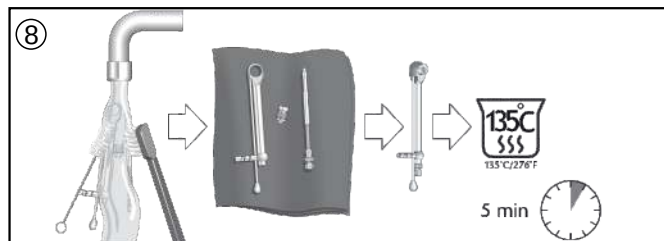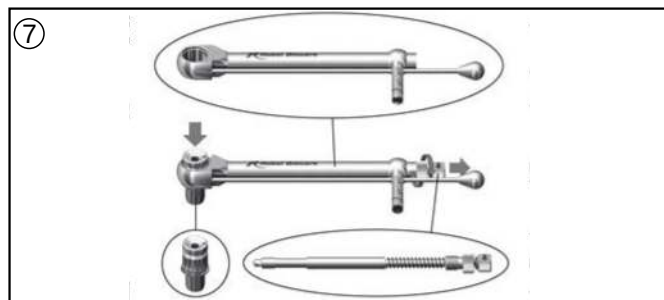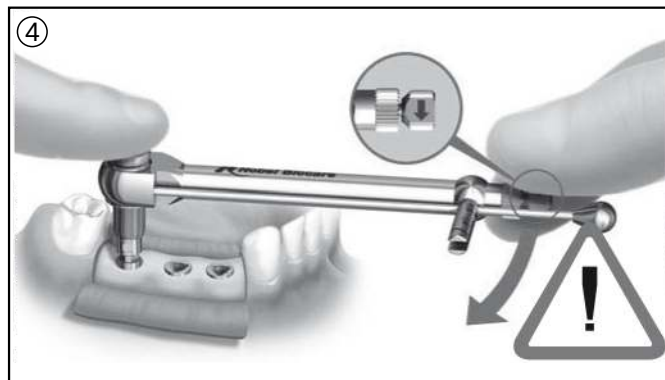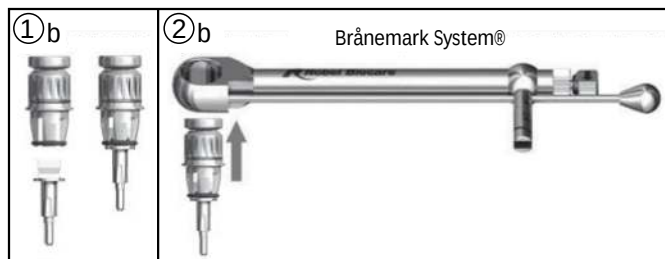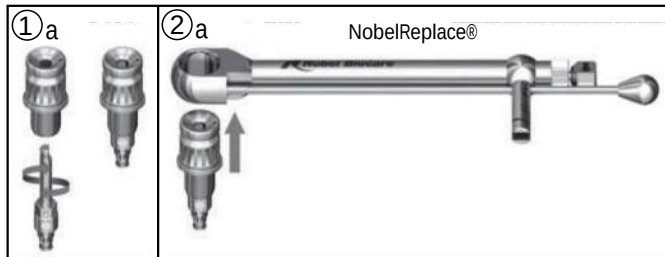

Instruções de Uso – Aplicação cirúrgica

Para fins de aperto ou ajuste da posição de implantes.

Fig 1. Insira a Chave de Inserção.

Fig 3. Para saber quais as instruções de manuseio e torque de aperto corretos, consulte o manual do produto aplicável. O torque de aperto máximo, 45 Ncm, é indicado pela linha na escala.

Fig 4. Se for necessário apertar mais, o torquímetro pode ser utilizado como uma catraca usando o corpo do torquímetro.

Advertência: A utilização do corpo do torquímetro ao invés do braço de nivelamento pode resultar em uma força de torque excessiva para o local do implante. Isso poderá provocar compressão excessiva do osso, conduzindo à reabsorção óssea.

Fabricante:



Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26, Västra Hamngatan 1, 411 17, Gotemburgo, Suécia - Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52.

Nobel Biocare USA LLC, 22715 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887-4609 - EUA - Telefone: 1 714 282 4800. Fax: 1 714 998 9236.

Responsável Técnico:

Luidgi Paolo Pedrazza
CREA/SC 125015-8

Importador:

KaVo do Brasil, Indústria e Comércio LTDA
Rua Chapecó, 86 - Joinville - SC
CEP: 89221-040 - Tel. 55 (47) 3451-0100

Reg. ANVISA: 10064010186
10064010200

LOT Número de Lote

Atenção: A venda deste dispositivo só pode ser efetuada para cirurgias de dentistas licenciados ou mediante receita médica devidamente carimbada e assinada pelo cirurgião dentista responsável.

www.nobelbiocare.com