

Caixas Esterilizáveis de Inox

Instruções de utilização

Ref. 1.014.6885
Ed.00 – 10.2021



Importante: leia as informações seguintes.

Limitação de responsabilidade:

Este produto é parte integrante de um conceito geral e só pode ser utilizado em conjunto com os produtos originais associados, em conformidade com as instruções e recomendações da Kavo do Brasil. A utilização não recomendada de produtos fabricados por terceiros em conjunto com os produtos da Kavo do Brasil irá tornar nula toda e qualquer garantia ou outra obrigação, expressa ou implícita, da Kavo do Brasil. O utilizador de produtos da Kavo do Brasil tem o dever de determinar se qualquer produto é ou não adequado para um paciente e circunstâncias específicas. A Kavo do Brasil não assume qualquer responsabilidade, expressa ou implícita, e não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, punitivos ou de outro tipo, resultantes ou associados a erros de avaliação ou prática profissional na utilização de produtos da Kavo do Brasil. O médico dentista também é obrigado a estudar regularmente os desenvolvimentos mais recentes relativos aos produtos da Kavo do Brasil e respetivas aplicações. Em caso de dúvida, o médico dentista deverá contactar a Kavo do Brasil. Uma vez que a utilização deste produto é controlada pelo médico dentista, esta é da sua responsabilidade. A Kavo do Brasil não assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes. Tenha em atenção que alguns produtos descritos nestas Instruções de Utilização poderão não estar aprovados, ter autorização de introdução no mercado ou estar licenciados para venda em todos os mercados.

Descrição e Utilização prevista:

Caixa esterilizável de Inox é utilizado para suportar os instrumentos reutilizáveis Nobel Biocare destinados para os tratamentos, como implantes detários e componentes protéticos. Para obter informações específicas sobre a utilização prevista, consulte as Instruções de Utilização do implante ou componente protético em causa.

Instruções de utilização e desmontagem para limpeza:

Para abrir a Caixa esterilizável de Inox da Kavo do Brasil, pressionar as abas nas laterais da tampa da caixa, conforme figura A e B e puxá-la para cima.



Figura A – Caixa fechada (imagem meramente ilustrativa)

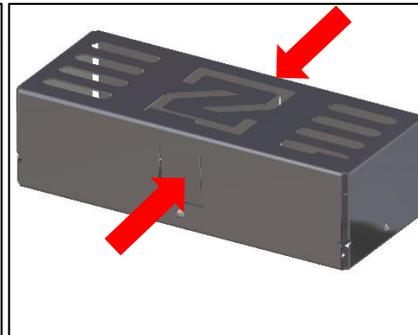


Figura B – Caixa fechada (imagem meramente ilustrativa)

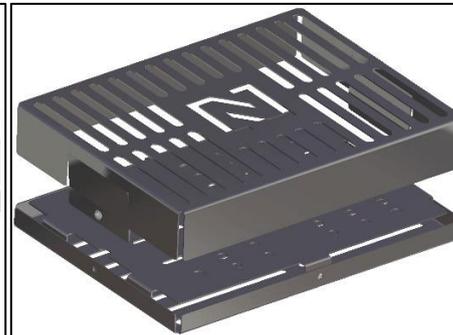


Figura C – Caixa aberta (imagem meramente ilustrativa)

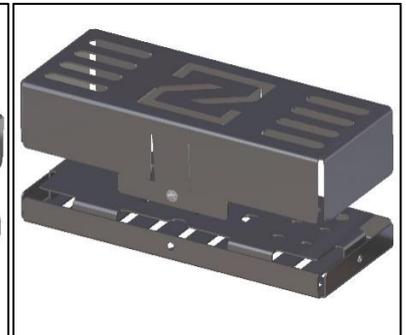


Figura D – Caixa aberta (imagem meramente ilustrativa)

Para limpeza e desinfecção da caixa desmontar a bandeja utilizando a força dos dedos, forçando-a retire a mesma nas posição indicadas nas figuras E e G.

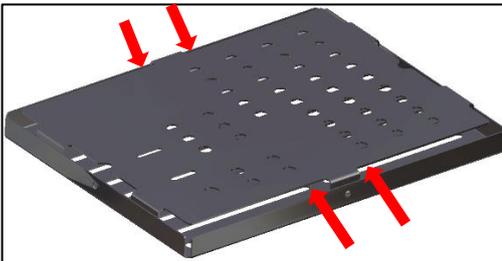


Figura E – Bandeja Montada (imagem meramente ilustrativa)

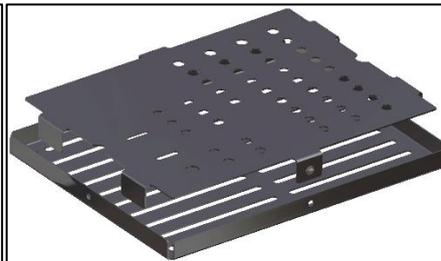


Figura F (imagem meramente ilustrativa)

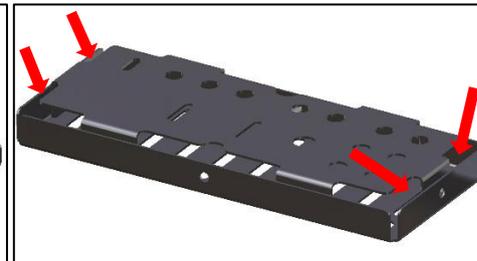


Figura G – Bandeja Montada (imagem meramente ilustrativa)

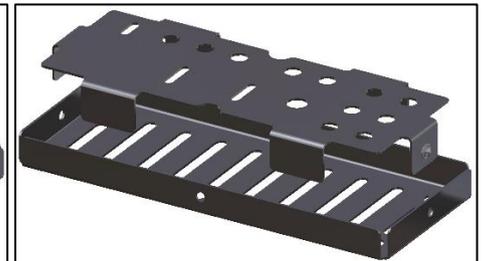


Figura H (imagem meramente ilustrativa)

Indicações:

A Caixa esterilizável de Inox é utilizada para acomodar os instrumentos reutilizáveis Nobel Biocare em tratamentos com implantes dentários realizados com implantes e componentes protéticos Nobel Biocare. Para obter informações sobre as indicações específicas, consulte as Instruções de Utilização do implante ou componente protético em causa.

Procedimento de manuseamento:

Para obter informações e respectiva utilização específicas sobre os instrumentos que serão encaixados na Caixa esterilizável de Inox, consulte as Instruções de Utilização do implante ou componente protético em causa.

Para obter mais informações sobre os procedimentos cirúrgicos e protéticos, consulte as orientações de tratamento disponíveis em www.nobelbiocare.com ou solicite a versão impressa mais recente junto de um representante da Nobel Biocare.

Materiais:

Caixa e Bandeja de Inox – AISI 304, Grommet: Silicone Autoclavável.

Instruções de limpeza e esterilização:

A Caixa esterilizável de Inox é fornecida não esterilizada e destina-se a ser reutilizada.

Antes de utilizar e reutilizar, limpe, desinfete e esterilize o produto com os parâmetros recomendados.

Esterilizar por vapor em autoclave a 135°C durante 05 minutos.

Armazenamento, manuseamento e transporte:

A Caixa esterilizável de Inox deverá ser conservada e transportada num ambiente seco e à temperatura ambiente, não devendo ser exposto à luz solar direta. O armazenamento e transporte incorretos podem influenciar as características do dispositivo, conduzindo a falhas.

Reposição:

Peças disponíveis para reposição:

- 10146833 - Caixa Nobel Maior;
- 10146834 - Caixa Nobel Menor;
- 10146835 - Bandeja Active/Parallel + Grommets Reposição;
- 10146836 - Bandeja Replace CC + Grommets Reposição;
- 10146837 - Bandeja Active Guided + Grommets Reposição;
- 10146838 - Bandeja Parallel CC Guided + Grommets Reposição;
- 10146839 - Bandeja Replace CC Guided + Grommets Reposição;
- 10146840 - Bandeja Protético + Grommets Reposição.

Descarte:

O descarte da Caixa esterilizável de Inox deve seguir os regulamentos locais e os requisitos ambientais, tendo em consideração os diferentes níveis de contaminação.

Fabricante: Kavo do Brasil Indústria e Comércio LTDA.
Rua Dona Francisca, 8.300, Bloco N - Sala 44 A e B
Condomínio Perini Business Park - Joinville – SC
CEP: 89219-600 - Tel.: (11) 3323-0500

Responsável Técnico: Andréa M. Garcia – CRF/SC: 6569



Não esterilizado



Número de Lote



Consultar as instruções
de utilização



Não utilizar se
a embalagem
estiver danificada

PT Todos os direitos reservados.

Nobel Biocare, o logótipo da Nobel Biocare e todas as restantes marcas comerciais mencionadas neste documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional, ou caso isso não seja evidente pelo contexto num determinado caso, marcas comerciais da Nobel Biocare. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala.