



Ormco™

DAMON ULTIMATM

SYSTEM

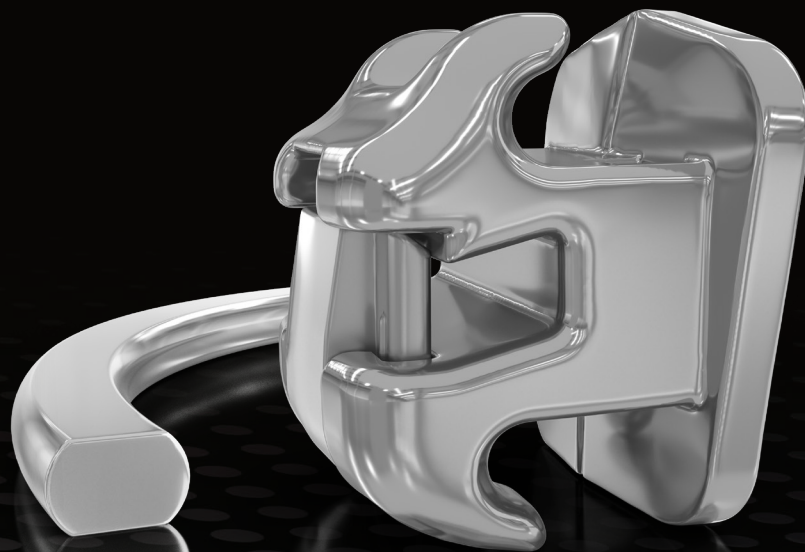

O PRIMEIRO SISTEMA VERDADEIRO
DE EXPRESSÃO TOTAL DE TORQUE

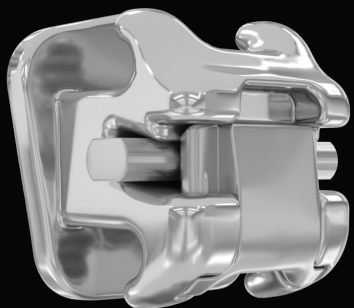

APRESENTANDO O REVOLUCIONÁRIO **DAMON ULTIMA™ SYSTEM**

Projetado para finalizações mais rápidas e precisas

Bráquetes autoligados passivos tradicionais e seus fios apresentam folga significativa, resultando em baixo controle, ajustes manuais e aumento no tempo de tratamento.

O sistema Damon Ultima é o primeiro sistema ortodôntico de expressão total de torque, projetado para finalizações mais rápidas e precisas. Foi completamente reprojeto para praticamente eliminar a folga para controle de rotação, angulação e torque precisos.




“ O primeiro conjunto bráquete-fio capaz de finalmente proporcionar expressão de torque total verdadeira. ”

- Dr. Dwight Damon


SISTEMA INTEGRADO PRATICAMENTE ELIMINA A FOLGA

O sistema Damon Ultima é projetado com um fio retangular patenteado, de bordas arredondadas e um *slot* em forma de paralelograma para proporcionar inserção direta nos pontos de contato horizontais e verticais.

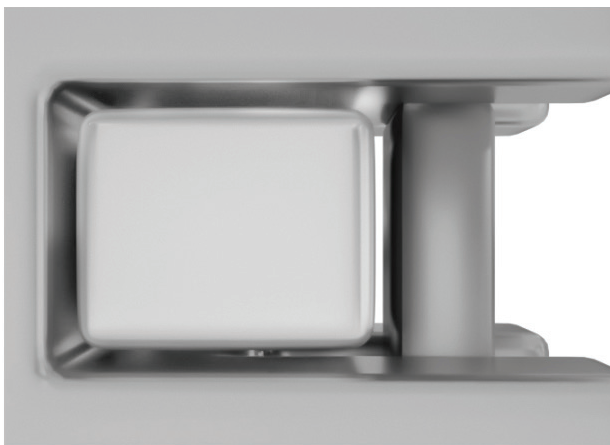

AUTOLIGADO PASSIVO TRADICIONAL

Folga excessiva, resultando em baixo controle.

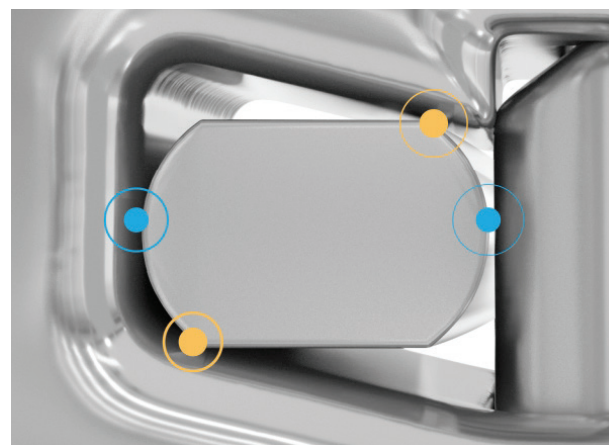


SISTEMA DAMON ULTIMA

Quatro pontos de contato para controle de rotação, angulação e torque precisos.

CONTROLE PRECISO DE **ROTAÇÃO, ANGULAÇÃO E TORQUE**

Obtenha controle antecipado, com a correção das rotações finalizadas no primeiro fio Damon Ultima retangular de bordas arredondadas, e expressão total de torque com o segundo fio Damon Ultima e forças mais leves.

SEQUÊNCIA DE FIOS PADRÃO

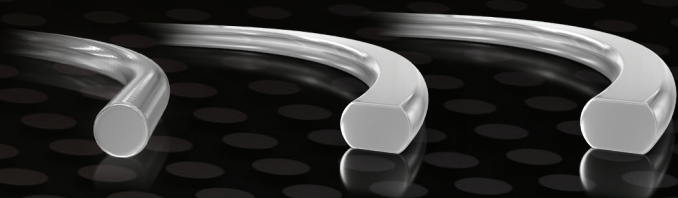

Fios redondos
.014, .018 CuNiTi

DAMON ULTIMA
Fio retangular com
bordas arredondadas
.014 x .0275 CuNiTi

DAMON ULTIMA
Fio retangular com
bordas arredondadas
.018 x .0275 CuNiTi



ROTAÇÃO

O encaixe dos pontos de contato horizontais do fio Damon Ultima retangular de bordas arredondadas proporciona um controle de rotação antecipado.



ANGULAÇÃO

A angulação então é resolvida antecipadamente com os pontos de contato verticais.




TORQUE

O encaixe nos pontos de contato verticais proporciona controle de torque e expressão total da prescrição com forças mais leves.



OPÇÕES DE BRÁQUETES RETROCLINE E PROCLINE

PARA INTENSIFICAR O CONTROLE DE TORQUE

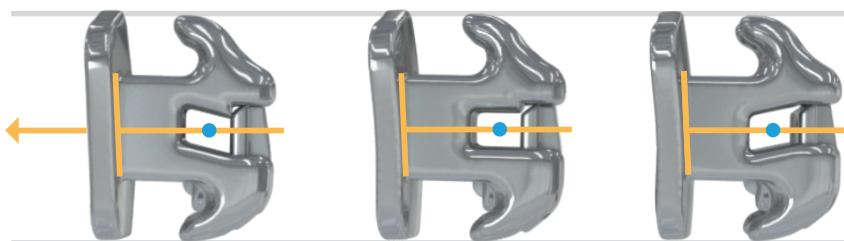

PROCLINE

Torque alto

NEUTRAL

RETROCLINE

Torque baixo

Os bráquetes são projetados a partir do ponto central do slot, para coincidir com o centro da coroa clínica expressando o torque desejado e proporcionando um posicionamento mais fácil e preciso.

OPÇÕES ADICIONAIS DE FIOS PARA CONTROLE DE TORQUE QUANDO NECESSÁRIO:

Tamanhos grandes disponíveis em:

- .019 X .0275, .020 X .0275, .021 X .0275 e em CuNiTi, TMA, e SS.
- .016 X .0275 SS disponível para alinhamento e correção transversal mais desafiadores.



CARACTERÍSTICAS APRIMORADAS: FÁCIL, CONVENIENTE E CONFIÁVEL



Aletas completamente reprojatadas aumentam a possibilidade de encaixar elásticos tipo corrente.



Travas projetadas para facilitar a abertura e fechamento com forças recíprocas leves e *feedback* tátil.


Trava do bráquete e fios projetados para reduzir interferências no fechamento.



Aletas mais suaves
projetadas para maior
conforto do paciente
e mínima interferência
oclusal.




**Base com malha de
calibre 80**, projetada
para intensificar a força
da colagem ao longo
do tratamento, e uma
remoção previsível.

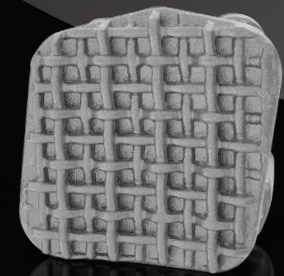

**Base romboide
com ranhura vertical
evidenciada** facilitam
o posicionamento.



**Slot vertical permite
a inserção de
ganchos**, projetados
para durabilidade
com os elásticos e
auxiliares da Ormco.

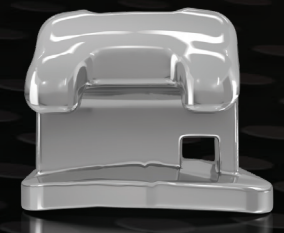

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Número da peça	Descrição
8.000.2780	Bráquete reposição Damon Ultima 21 Neutral
8.000.2782	Bráquete reposição Damon Ultima 11 Neutral
8.000.2783	Bráquete reposição Damon Ultima 21 Retrocline
8.000.2784	Bráquete reposição Damon Ultima 11 Retrocline
8.000.2785	Bráquete reposição Damon Ultima 21 Procline
8.000.2786	Bráquete reposição Damon Ultima 11 Procline
8.000.2787	Bráquete reposição Damon Ultima 22 Neutral
8.000.2788	Bráquete reposição Damon Ultima 12 Neutral
8.000.2789	Bráquete reposição Damon Ultima 22 Retrocline
8.000.2790	Bráquete reposição Damon Ultima 12 Retrocline
8.000.2791	Bráquete reposição Damon Ultima 22 Procline
8.000.2792	Bráquete reposição Damon Ultima 12 Procline
8.000.2793	Bráquete reposição Damon Ultima 23 Neutral
8.000.2794	Bráquete reposição Damon Ultima 13 Neutral
8.000.2795	Bráquete reposição Damon Ultima 23 Retrocline
8.000.2796	Bráquete reposição Damon Ultima 13 Retrocline
8.000.2797	Bráquete reposição Damon Ultima 23 Procline
8.000.2798	Bráquete reposição Damon Ultima 13 Procline
8.000.2799	Bráquete reposição Damon Ultima 24/25 Neutral
8.000.2800	Bráquete reposição Damon Ultima 14/15 Neutral
8.000.2801	Bráquete reposição Damon Ultima 31 Neutral
8.000.2802	Bráquete reposição Damon Ultima 41 Neutral
8.000.2803	Bráquete reposição Damon Ultima 31 Retrocline
8.000.2804	Bráquete reposição Damon Ultima 41 Retrocline
8.000.2805	Bráquete reposição Damon Ultima 31 Procline
8.000.2806	Bráquete reposição Damon Ultima 41 Procline
8.000.2807	Bráquete reposição Damon Ultima 32 Neutral
8.000.2808	Bráquete reposição Damon Ultima 42 Neutral
8.000.2809	Bráquete reposição Damon Ultima 32 Retrocline
8.000.2810	Bráquete reposição Damon Ultima 42 Retrocline
8.000.2811	Bráquete reposição Damon Ultima 32 Procline
8.000.2812	Bráquete reposição Damon Ultima 42 Procline
8.000.2813	Bráquete reposição Damon Ultima 33 Neutral
8.000.2814	Bráquete reposição Damon Ultima 43 Neutral
8.000.2815	Bráquete reposição Damon Ultima 33 Retrocline
8.000.2816	Bráquete reposição Damon Ultima 43 Retrocline
8.000.2817	Bráquete reposição Damon Ultima 33 Procline
8.000.2818	Bráquete reposição Damon Ultima 43 Procline
8.000.2819	Bráquete reposição Damon Ultima 34 Neutral
8.000.2820	Bráquete reposição Damon Ultima 44 Neutral
8.000.2821	Bráquete reposição Damon Ultima 35 Neutral
8.000.2822	Bráquete reposição Damon Ultima 45 Neutral

ARCOS	
Numero da peça	Descrição
8.000.2846	Arco Damon Ultima TMA .18x275 (1un)
8.000.2847	Arco Damon Ultima TMA .18x275 (5un)
8.000.2848	Arco Damon Ultima TMA .19x275 (1un)
8.000.2849	Arco Damon Ultima TMA .19x275 (5un)
8.000.2850	Arco Damon Ultima CuNiTi 14x275 (1un)
8.000.2851	Arco Damon Ultima CuNiTi 14x275 (5un)
8.000.2852	Arco Damon Ultima CuNiTi 18x275 (1un)
8.000.2853	Arco Damon Ultima CuNiTi 18x275 (5un)
8.000.2854	Arco Damon Ultima CuNiTi 19x275 (1un)
8.000.2855	Arco Damon Ultima CuNiTi 19x275 (5un)
8.000.2856	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável .18x275 (1un)
8.000.2857	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável .18x275 (5un)
8.000.2858	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável .19x275 (1un)
8.000.2859	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável .19x275 (5un)
227-1118	Arco Damon Ultima TMA 18x275 (caixa com 10 un)
227-1116	Arco Damon Ultima TMA 19x275 (caixa com 10 un)
227-1122	Arco Damon Ultima TMA 20x275 (caixa com 10 un)
227-1123	Arco Damon Ultima TMA 21x275 (caixa com 10 un)
227-1161	Arco Damon Ultima CuNiTi 14x275 (caixa com 10 un)
227-1163	Arco Damon Ultima CuNiTi 18x275 (caixa com 10 un)
227-1164	Arco Damon Ultima CuNiTi 19x275 (caixa com 10 un)
227-1165	Arco Damon Ultima CuNiTi 20x275 (caixa com 10 un)
227-1166	Arco Damon Ultima CuNiTi 21x275 (caixa com 10 un)
227-1267	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável 16x275 (caixa com 10 un)
227-1272	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável 18x275 (caixa com 10 un)
227-1271	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável 19x275 (caixa com 10 un)
227-1273	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável 20x275 (caixa com 10 un)
227-1274	Arco Damon Ultima Aço Inoxidável 21x275 (caixa com 10 un)
227-0241	Ganchos Damon Ultima CuNi-Ti .014x.0275 (5 un)
227-0242	Ganchos Damon Ultima CuNi-Ti .018x.0275 (5 un)

KITS	
Número da peça	Descrição
8.000.2823	Caso Damon Ultima Neutral (sup e inf)
8.000.2824	Caso Damon Ultima Procline (sup) + Damon Ultima Neutral (inf)
8.000.2825	Caso Damon Ultima Retrocline (sup) + Damon Ultima Neutral (inf)
8.000.2826	Caso Damon Ultima Neutral (sup) + Damon Ultima Procline (inf)
8.000.2827	Caso Damon Ultima Neutral (sup) + Damon Ultima Retrocline (inf)
8.000.2828	Caso Damon Ultima Procline (sup) + Damon Ultima Retrocline (inf)
8.000.2829	Caso Damon Ultima Procline (sup e inf)
8.000.2830	Caso Damon Ultima Retrocline (sup) + Damon Ultima Procline (inf)
8.000.2831	Caso Damon Ultima Retrocline (sup e inf)
8.000.2890	Caso Damon Ultima Neutral (inf)
8.000.2891	Caso Damon Ultima Procline (inf)
8.000.2892	Caso Damon Ultima Retrocline (inf)

COMBOS	
Numero da peça	Descrição
8.000.2834	Combo Damon Ultima Neutral (sup e inf)
8.000.2835	Combo Damon Ultima Procline (sup) + Damon Ultima Neutral (inf)
8.000.2836	Combo Damon Ultima Retrocline (sup) + Damon Ultima Neutral (inf)
8.000.2837	Combo Damon Ultima Neutral (sup) + Damon Ultima Procline (inf)
8.000.2838	Combo Damon Ultima Neutral (sup) + Damon Ultima Retrocline (inf)
8.000.2839	Combo Damon Ultima Procline (sup) + Damon Ultima Retrocline (inf)
8.000.2840	Combo Damon Ultima Procline (sup e inf)
8.000.2841	Combo Damon Ultima Retrocline (sup) + Damon Ultima Procline (inf)
8.000.2842	Combo Damon Ultima Retrocline (sup e inf)

Para mais informações, entre em contato com seu representante de vendas Ormco ou por meio dos canais:



0800 055 0123



vendasbrasil@ormco.com

Ormco™