

SPARKTM
JUNIOR

Ajude seus dentes
a encontrarem o
caminho correto



Seus dentes precisam encontrar o caminho certo

Enquanto seus dentes trabalham duro, às vezes, eles se deslocam em direções diferentes. Isso também acontece com irmãos mais velhos, irmãs – até com a mamãe e o papai. Mas com o Sparky e o seu ortodontista, vamos ajudar seus dentes a voltarem para o caminho certo.

Por que meus dentes precisam estar no lugar certo?
Boa pergunta!

- ▶ Facilitar a limpeza;
- ▶ Melhor para mastigar os alimentos;
- ▶ Melhora a sua fala;





Olá, eu sou o Sparky!

Eu trabalho com seus pais e o seu ortodontista para guiar seus dentes de volta para o caminho correto. E adivinha?

Você também pode ajudar!




Seu alinhador Spark é como um mapa mágico!

Eles gentilmente ajudam seus dentes a voltar para o lugar correto - assim você poderá comer, falar e crescer corretamente.

Do que seu alinhador Spark é feito?

De um material incrível chamado TruGEN™, que torna seus alinhadores Spark inteligentes, resistentes e suaves.



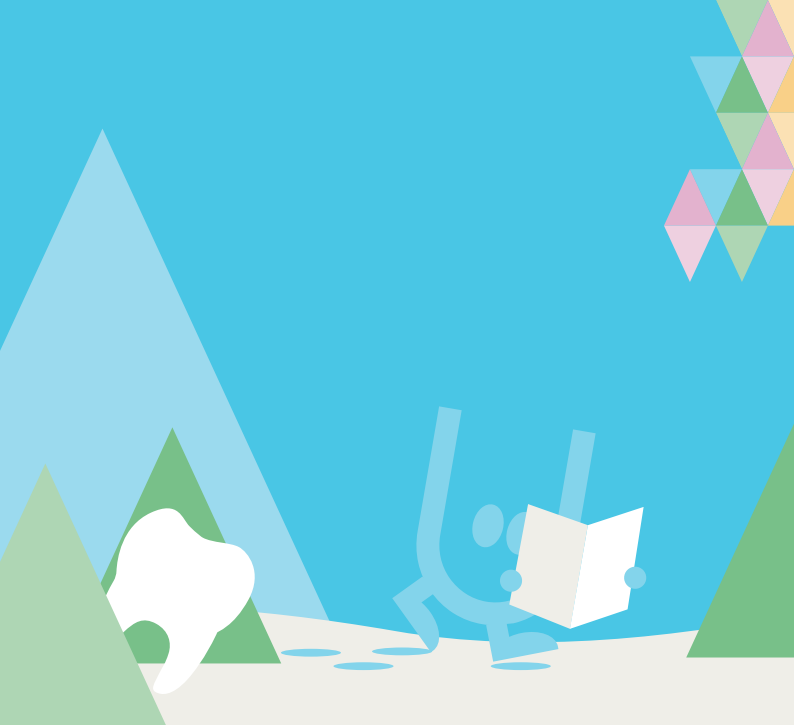


Os alinhadores Spark tornam sua jornada mais fácil!

- ▶ **Coma seus lanches favoritos.**
Continue aproveitando os alimentos que você adora!
- ▶ **Fique com os dentes limpos.**
Escove e use o fio dental normalmente.
- ▶ **A aventura continua.**
Brinque, pratique esportes e ria o dia todo.
- ▶ **Confortáveis para a viagem.**
Confortáveis, transparentes e sem BPA.
- ▶ **Guia personalizada.**
Seu alinhador é feito sob medida para você.



Comece a aventura épica dos seus dentes!

A cada 1–2 semanas, você receberá um novo conjunto de alinhadores Spark – um novo mapa mágico que mostra o próximo passo!

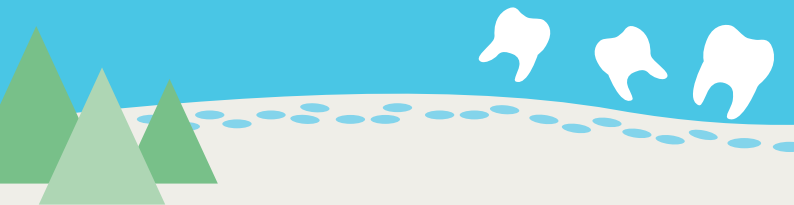

Mantenha-se no caminho!

- ▶ **Use seus alinhadores**
de 20 a 22 horas por dia.
- ▶ **Retire seu alinhador**
para escovar seus dentes, comer ou beber (pode mantê-lo para beber água fria).
- ▶ **Guarde seu alinhador com cuidado.**
Use o estojo Spark quando não estiver usando.





Dicas do Sparky para uma jornada tranquila

- ▶ **Escove seus dentes após você comer algo.**
Isso é muito importante para evitar cáries.
- ▶ **Higienize seus alinhadores.**
Use escova de dentes e um pouco de pasta dental.
- ▶ **Perdeu seus alinhadores?**
Use seu último conjunto e avise seus pais imediatamente.



Por que o Spark é o melhor para você?

A jornada tem curvas e desafios – mas com Spark Aligners você terá uma aventura incrível e um final feliz.

E aqui está o porquê!

- ▶ **Ele é super confortável**
e você deve usá-lo todos os dias.
- ▶ **Ele é fácil de limpar.**
Assim você pode voltar para sua diversão mais rápido.
- ▶ **Ele é quase imperceptível**
na boca.
- ▶ **Ele cresce junto com você.**
Ou seja, acompanha seu crescimento.





Seus dentes
podem estar
um pouco
perdidos...



...mas com o seu
alinhador Spark
eles encontrarão
o caminho correto
de volta!



Missão: leve seus dentes para o caminho correto!



Nível 1: A missão começa!

Conheça seu ortodontista muito especial e inicie sua jornada.



Nível 2: Espelho mágico.

Fique parado enquanto o scanner encontra seus dentes – sem massa, só tecnologia legal!



Nível 3: Hora do mapa do tesouro!

Seu plano de tratamento personalizado é como um mapa guiando seus dentes para o caminho correto, passo a passo.

Nível 4: Prepare-se!

Seus alinhadores Spark chegam – confortáveis, transparentes e prontos para a ação!



Nível final: Vitória!

Seus dentes estão em casa! Agora mostre esse sorriso incrível para o mundo!





Comece
sua jornada
hoje!



Aprenda mais em
sparkaligners.com/pt-br
e nos siga no Instagram
[@sparkalignersbr](https://www.instagram.com/sparkalignersbr)



As imagens contidas no material representam modelos. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Lembramos que é importante consultar seu ortodontista para entender o seu tempo de tratamento, que pode variar de acordo com o caso. Versão 1 - Janeiro/2026.