



Tu sonrisa merece una segunda oportunidad

Pregúntanos ahora sobre los implantes

Información importante sobre seguridad

Este material es solo para fines informativos. No sustituye al consejo o asesoramiento de un profesional de la salud. Nobel Biocare realiza todos los esfuerzos para proporcionar información precisa y oportuna, pero no ofrece ninguna garantía al respecto. Debes consultar y confiar únicamente en el consejo de tu profesional de la salud.

El tratamiento con implantes dentales es un procedimiento quirúrgico y requiere una evaluación previa por parte del dentista para asegurar que la salud del paciente, tanto dental como general, permita el tratamiento con implantes dentales. La colocación de los implantes dentales se realiza durante un procedimiento quirúrgico, el cual conlleva un riesgo general que incluye infección, posibles daños en el tejido nervioso y un sangrado excesivo durante o después de la intervención. Como paciente, deberás consultar a tu clínico para averiguar si los implantes dentales son la opción adecuada para ti.


La comunicación directa con los pacientes o la publicidad médica puede estar estrictamente prohibida en algunos mercados. Es obligación del clínico informarse acerca de cualquier posible restricción legal y cumplir las leyes y las normativas vigentes en su jurisdicción.

Cómo afecta la pérdida de dientes al hueso maxilar y a las encías

Pérdida de un solo diente




Pérdida de varios dientes

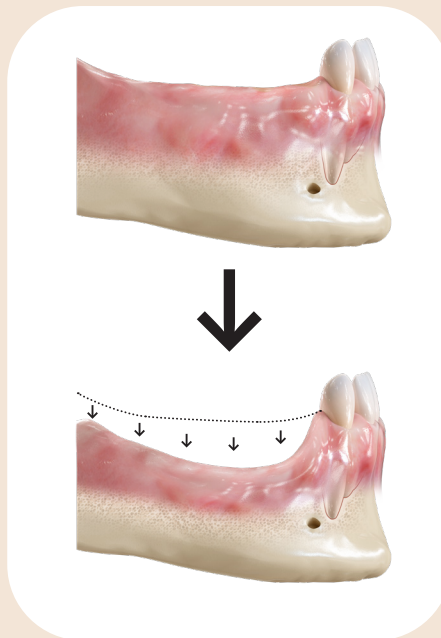

Pérdida de todos los dientes



Reemplazo completo desde la raíz hasta el diente

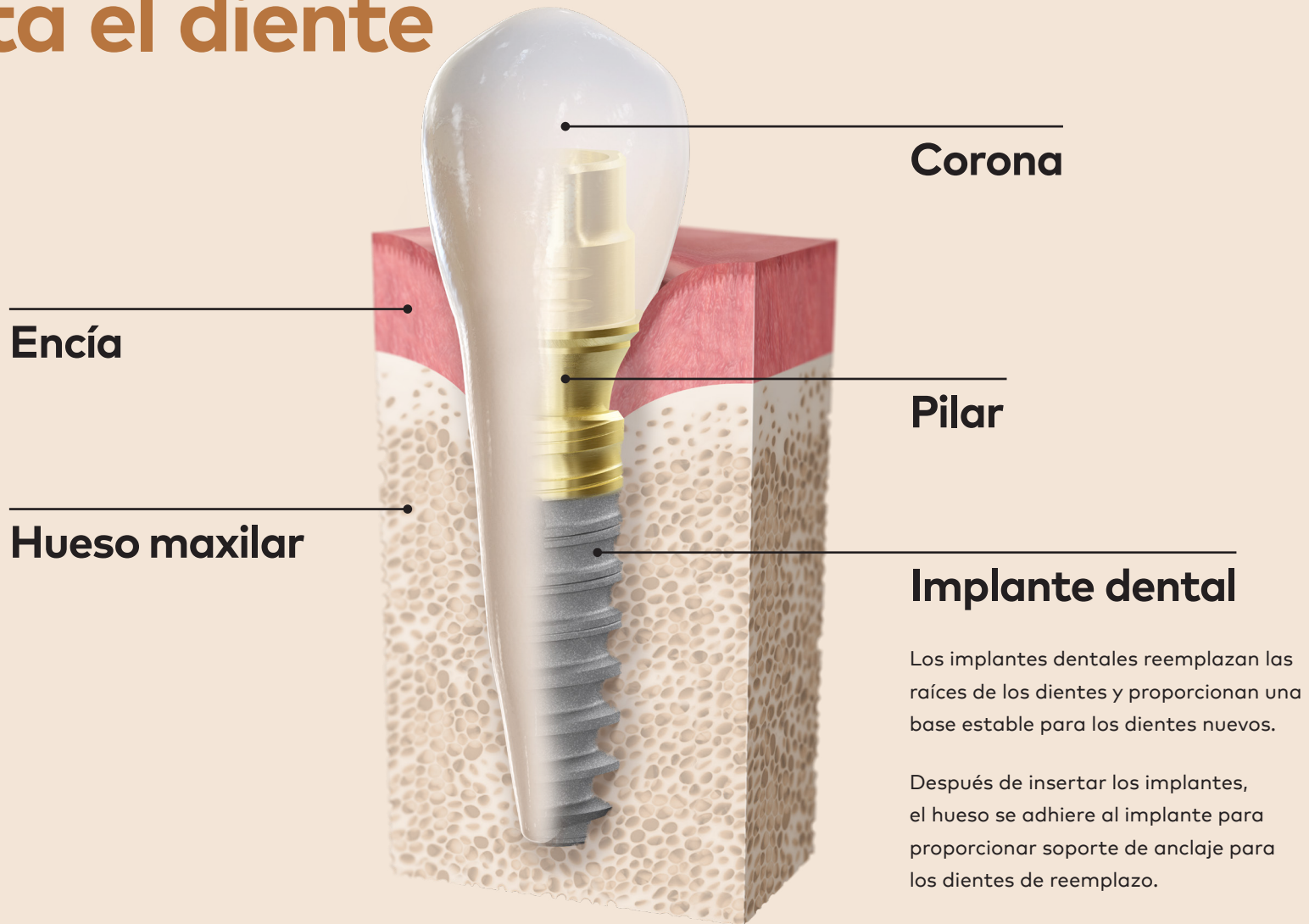

¿Qué hace que los implantes dentales sean tan fiables?



Siéntete natural, trabaja con naturalidad

Disfruta de comer, sonreír y hablar con facilidad. Los implantes dentales se sienten como tus propios dientes, ayudándote a vivir con confianza el día a día.¹



Apoya tu salud bucal

Los implantes sostienen la mandíbula y ayudan a mantener una sonrisa estable, lo que contribuye a la salud bucal a largo plazo cuando faltan dientes naturales.



Una inversión a largo plazo

A diferencia de los puentes que es posible que haya sustituir, un implante bien cuidado puede durar toda la vida, lo que te brinda valor duradero y tranquilidad.



Mantén tu aspecto de siempre

Los implantes ayudan a prevenir la pérdida ósea y la flacidez facial, que ocurre cuando faltan dientes naturales, para que puedas mantener su apariencia natural y sentirte tú mismo.



Respaldado por la ciencia

En más de 4.500 publicaciones científicas aparecen los implantes de Nobel Biocare, y el concepto de tratamiento All-on-4® tiene 25 años de éxito clínico documentado.

¹ Howe MS, Keys W, Richards D. Long-term (10-year) dental implant survival: A systematic review and sensitivity meta-analysis. J Dent. 2019;84:9-21.


¿Por qué es importante buscar atención si faltan dientes o están dañados?

Alimentación y habla


Comer alimentos duros o pegajosos como nueces, frutas y verduras puede ser un desafío si te faltan dientes o están dañados. El movimiento de los dientes y los problemas en las encías pueden provocar molestias y presión. Esto a menudo tiene como consecuencia una dieta limitada, lo que puede afectar tu salud. Restaurar tu capacidad de masticar ayuda a tu cuerpo a absorber nutrientes de una gama más amplia de alimentos, lo que favorece el bienestar general.



Función

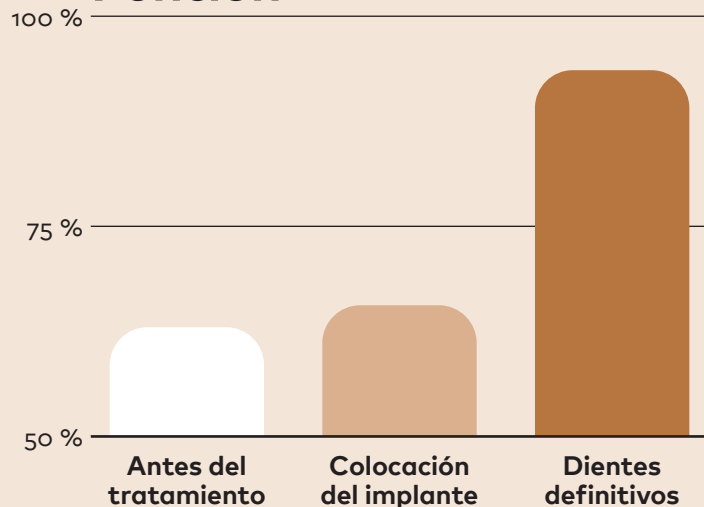


Habla

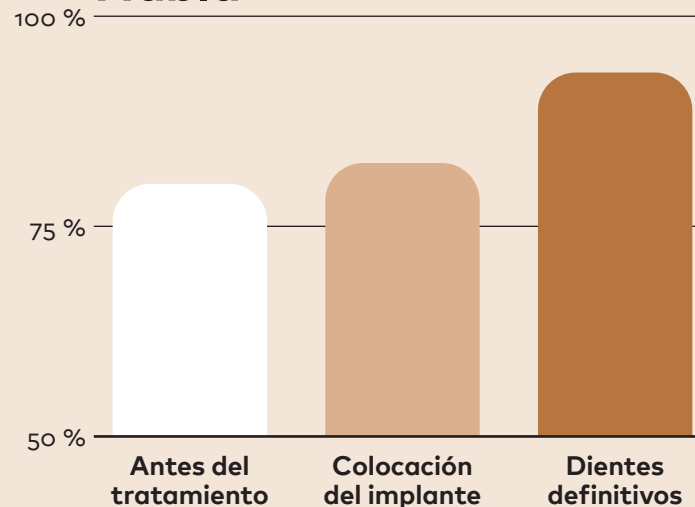

¿Por qué es importante buscar atención si faltan dientes o están dañados?

Confianza y bienestar

Si te faltan dientes o están dañados, es posible que te sientas menos seguro al sonreír o reír. Puede que evites el contacto con otras personas.

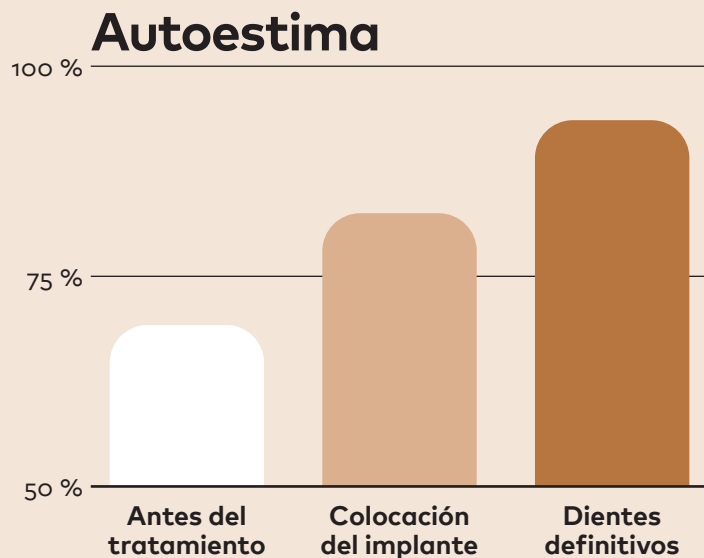


¿Por qué es importante buscar atención si faltan dientes o están dañados?

Aspecto más joven


Cuando se pierden dientes, el hueso y el tejido blando que lo cubre también comienzan a encogerse. La piel alrededor de la boca y el mentón pierde soporte, lo que provoca arrugas y un hundimiento de la parte inferior del rostro que puede hacer que parezca mayor de lo que realmente es.



Estética

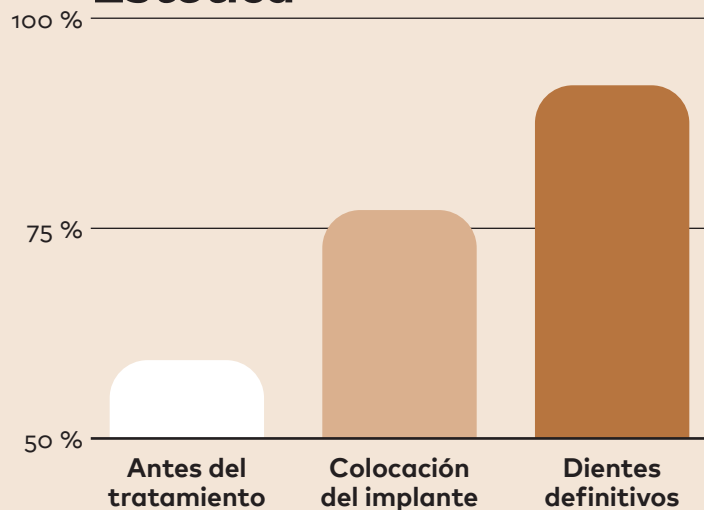

Sensación¹

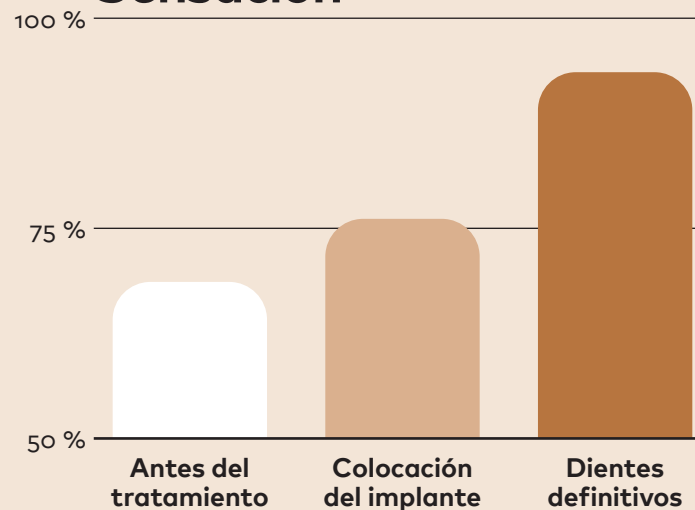


¹ Restauración que se siente como si fueran los propios dientes
Ref: Kolinski et al. 2013, De Rouck et al. 2009

Opciones para sustituir un diente unitario

- 1 Sin tratamiento
- 2 Puente dental
- 3 Colocación de una corona en un implante dental



1 Sin tratamiento

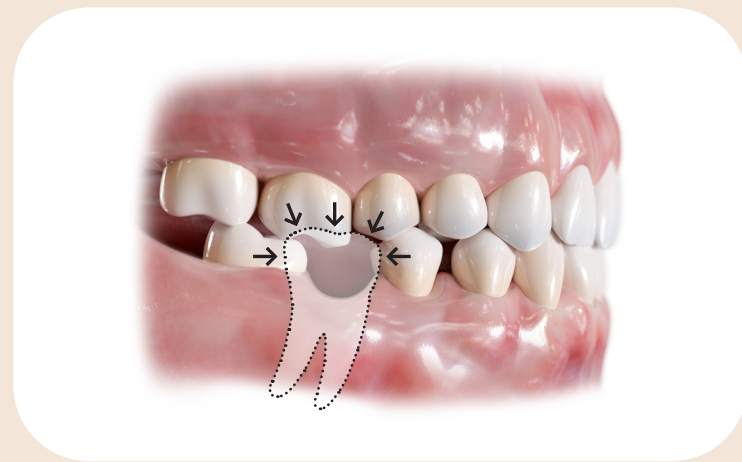

La pérdida de un diente altera la interacción entre los dientes y el hueso. El hueso maxilar empieza a reducirse y las encías retroceden. Los dientes adyacentes pueden ocupar el espacio vacío, mientras que los dientes opuestos pueden desplazarse en el espacio vacío.

2 Puente dental



Puente cementado

- Los puentes dentales pueden ofrecer alivio a corto plazo, pero pueden aumentar la presión sobre la mandíbula y empeorar la pérdida ósea con el paso del tiempo.
- Preparar los dientes cercanos para un puente los dañará.



Dentadura parcial extraíble (flipper)

- El puente se fija a los dientes adyacentes, que se tienen que preparar.
- Los cierres metálicos se pueden ver al hablar o reír.

3 Colocación de una corona en un implante dental



- Un implante dental sustituye la raíz del diente y sirve como base para la corona dental.
- Los dientes adyacentes se mantienen intactos, porque el diente nuevo está conectado directamente al implante.
- Si tu dentista utiliza componentes de Nobel Biocare, tendrán garantía de la corona y el implante.
- Obtener un implante dental implica un procedimiento quirúrgico que puede conllevar riesgos. Tu dentista te explicará todos los riesgos detalladamente.


Tu dentista te informará de todos los posibles escenarios para tu caso antes de la cirugía. Consulte con tu dentista para averiguar si los implantes dentales son adecuados para ti.

Opciones para múltiples dientes faltantes

- 1 Sin tratamiento
- 2 Puente dental
- 3 Colocación de un puente en un implante dental



1 Sin tratamiento

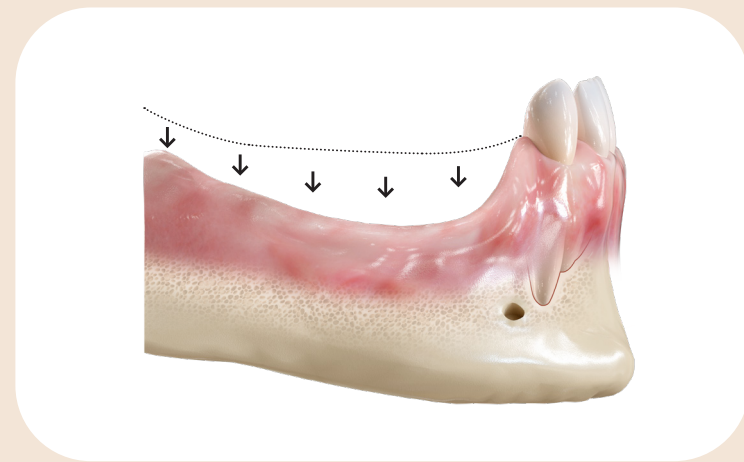

Cuando faltan varios dientes, la pérdida ósea puede ser tan significativa que podría provocar cambios en la línea del maxilar y en el aspecto facial. Si no se realiza ningún tratamiento, masticar los alimentos puede resultar difícil y los alimentos pueden quedar atascados en los espacios vacíos.

2 Puente dental



Puente cementado

- Un puente es un conjunto de dientes nuevos que se utiliza para ocupar los espacios vacíos tras la pérdida de uno o varios dientes.
- Impide que los dientes adyacentes se muevan y afecten a tu oclusión.
- Los dientes adyacentes se desgastan y se colocan encima coronas cementadas.
- Reproduce una superficie masticatoria estable.



Dentadura parcial

- El puente se fija a los dientes adyacentes, que se tienen que preparar.
- Los cierres metálicos se pueden ver al hablar o reír.

3 Colocación de un puente en implantes dentales



- Un puente de implantes es una prótesis dental que reemplaza múltiples dientes faltantes.
- Impide que los demás dientes se muevan y afecten a tu oclusión.
- Restablece totalmente la función masticatoria.
- Si se fija un puente sobre implantes dentales, los dientes adyacentes se mantienen intactos.
- La correcta masticación y el material de la superficie del implante dental mantienen los niveles existentes de hueso maxilar y previenen una mayor pérdida ósea.
- Garantía en la corona si tu dentista utiliza componentes de Nobel Biocare.
- Obtener un implante dental implica un procedimiento quirúrgico que puede conllevar riesgos. Tu dentista te explicará todos los riesgos detalladamente.

Opciones para la rehabilitación de la sonrisa de mandíbula completa

**Soluciones alternativas a
las dentaduras postizas o a
todos los dientes faltantes**



Dentaduras



Mandíbula encogida



- Cuando faltan todos los dientes, el deterioro óseo puede ser tan grave que podría provocar la deformación de las estructuras faciales.
- Las dentaduras postizas pueden proporcionar alivio a corto plazo, pero con el tiempo su movimiento puede aumentar la presión sobre el hueso maxilar y empeorar el deterioro óseo.

- Este encogimiento afectará negativamente al ajuste de tu dentadura postiza, lo que significa que tendrás que visitar al dentista con más frecuencia para reajustarla.
- Los dientes faltantes afectan aún más a tu apariencia; debido a que tus labios ya no están sostenidos desde adentro, su barbilla comienza a moverse hacia adelante y hacia arriba y tus labios se giran hacia adentro.
- Incluso con dentaduras postizas, el encogimiento de tu mandíbula puede hacer que parezcas mayor.

Mandíbula completa

Soluciones fijas extraíbles



Dentadura implantosoportada

- Las soluciones fijas extraíbles son una alternativa de prótesis completa que utiliza implantes como anclajes fijos. No obstante, estas prótesis pueden extraerse por uno mismo para facilitar su limpieza.
- Ofrecen muchas ventajas en comparación con las dentaduras postizas convencionales.



Puente fijo extraíble sobre una barra de implantes

- Se prescinde de adhesivos para dentaduras postizas
- El ajuste seguro mejora la masticación y el habla
- Reduce la irritación de las encías común a las dentaduras postizas tradicionales
- Aspecto y sensación naturales
- Fácil de extraer para limpiar

Mandíbula completa

Soluciones fijas



Puente fijo sobre múltiples implantes

- Se fija a cuatro o más implantes que actúan como raíces naturales.
- Ayuda a conservar el hueso y evitar una mayor pérdida.
- Reduce la irritación de las encías causada por dentaduras postizas sueltas.
- Aspecto y sensación naturales.



El concepto de tratamiento All-on-4®

- Una opción de tratamiento que te permite realizar extracciones, cirugía de implantes y colocación de un puente provisional, todo en un solo día.¹
- Este concepto puede eliminar la necesidad de injerto óseo.

¹ Si se cumplen los criterios aplicables al paciente y se logra una estabilidad adecuada, todos los implantes de Nobel Biocare se pueden cargar con una restauración provisional fija el mismo día de la cirugía.

Pasos del tratamiento

¿En qué consiste el tratamiento?

Diagnóstico digital y
planificación del tratamiento

Colocación diferida del implante

Colocación inmediata del implante

Comparación de costes

Aumento de hueso

¿Por qué tu dentista utiliza
implantes de Nobel Biocare?



¿En qué consiste el tratamiento?



Planificación de tu tratamiento

Consulta con tu dentista y determina qué solución es la adecuada para ti, teniendo en cuenta tu historial dental y médico. Juntos, crearéis un plan de tratamiento y programaréis tu cirugía y las citas.

Colocación del o los implantes

El día de la cirugía, se extraerán los dientes afectados y, si es posible, se colocarán cuidadosamente el o los implantes dentales en la mandíbula. Si el procedimiento seleccionado lo permite, saldrás de tu cita con una restauración fija provisional y una nueva sonrisa.

Control final y colocación del nuevo diente

Una vez que las encías y el hueso hayan cicatrizado (esto puede tardar de 3 a 9 meses, dependiendo de tu situación clínica y el procedimiento elegido), regresarás al dentista para recibir tu restauración definitiva. Saldrás con una sonrisa segura e instrucciones claras sobre el cuidado.

Diagnóstico digital y planificación del tratamiento



Primera exploración

- El uso de herramientas digitales puede ayudar a tu dentista en el diagnóstico, la planificación del tratamiento y la ejecución de tu procedimiento.
- Además de las radiografías, estos instrumentos también pueden ayudar a tu dentista a explicarte tu situación clínica y tus opciones.



Diagnóstico digital

- Algunas herramientas digitales pueden aumentar la predictibilidad y la precisión de tu procedimiento.

Tratamiento que incluye extracción dental

Colocación convencional del implante (posterior)



Extracción del diente, colocación del implante y cicatrización



Restauración definitiva


Tres a nueve meses después de la colocación del implante

Tratamiento que incluye extracción dental

Colocación y función del implante inmediata (anterior)



Extracción del diente, colocación del implante y corona provisional

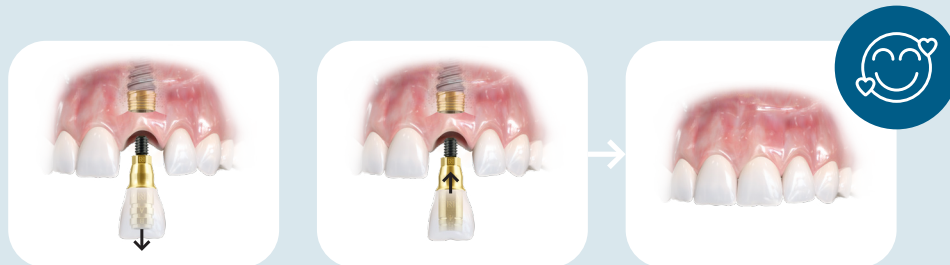


Restauración definitiva


Tres a nueve meses después de la colocación del implante

Técnicas de aumento de hueso


Aumento de hueso en el alveolo postextracción

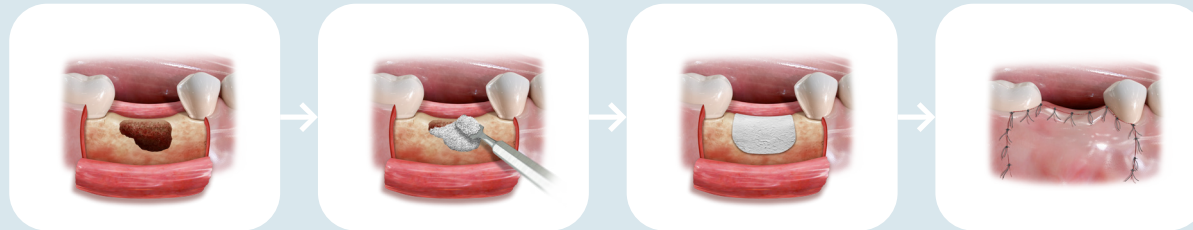

Aumento de seno

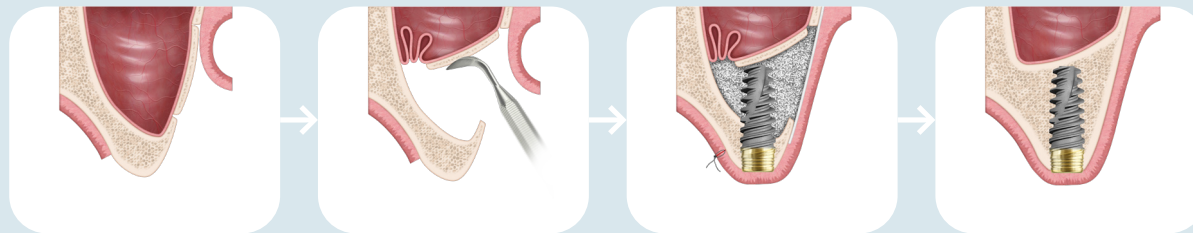

Aumento de hueso horizontal y vertical

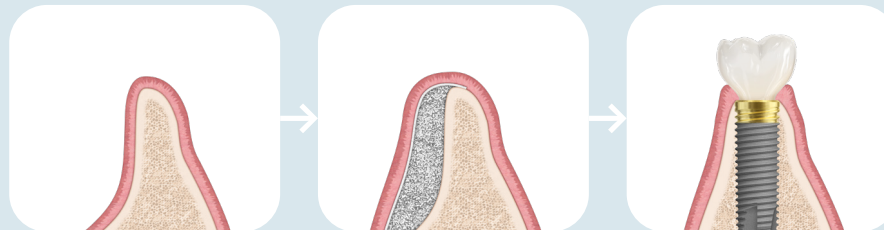

Técnicas de aumento de hueso


Aumento de hueso alrededor del implante



Aumento de hueso para tratar defectos periodontales



Coste frente a ventajas

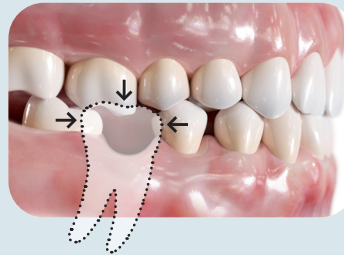

Sin tratamiento



Puente



Implante dental

Costes	Costes iniciales	Ninguno	Inferior	Superior
	Costes a largo plazo después del tratamiento	Superior	Superior¹	Inferior
Ventajas	Durabilidad	-	●	● ● ●
	Los dientes adyacentes permanecen intactos	●	-	● ● ●
	Conservar la mandíbula	-	●	● ●

Nota Dependiendo de tu situación clínica, es posible que no todas las opciones estén disponibles para ti. Tu dentista sigue siendo tu mejor fuente de información sobre tu cuidado dental y tus opciones. Pueden brindarte información adicional y responder cualquier pregunta o inquietud que puedas tener.

¹ Mayor coste debido a la menor vida útil de la restauración, lo que implica tener que repararla o incluso hacer una restauración totalmente nueva después de algunos años.

¿Por qué tu dentista se asocia con Nobel Biocare?



Más de 60 años de experiencia clínica en implantología dental

+20 millones de sonrisas renovadas

Más de 4.500 publicaciones científicas

Producto fabricado en **Suecia y Estados Unidos**

Garantía de implantes y componentes protésicos



Para obtener más información, visita:
nobelbiocare.com/patient

96349 ES 2603 Impreso en la UE © Nobel Biocare Services AG, 2026.

Reservados todos los derechos. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de los productos están destinadas solamente a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto.

Información importante sobre el tratamiento con implantes dentales en general: la colocación de implantes dentales se realiza durante un procedimiento quirúrgico. La cirugía dental conlleva ciertos riesgos generales, como infección del hueso, hormigueo debido a daños en el tejido nervioso, que podría ser temporal o de larga duración, y sangrado excesivo durante o después de la cirugía.

Los implantes dentales no están indicados en pacientes pediátricos en los que el crecimiento del hueso maxilar no ha sido documentado o en personas que no tienen una salud adecuada para pasar por un procedimiento quirúrgico dental, tienen un volumen de hueso inadecuado o son alérgicos o hipersensibles al titanio comercialmente puro. Tras la colocación, los implantes dentales pueden tener problemas de integración con el hueso. Si ocurre, tendrán que extraerse en un procedimiento secundario. Algunos factores pueden afectar al proceso de cicatrización, ya sea del hueso o del tejido blando. Entre estos factores se incluye tabaquismo, diabetes no controlada, radioterapia orofacial, terapia con esteroides, infecciones en el hueso adyacente. La posibilidad de colocación inmediata y la utilización de una prótesis depende de varios factores como la presencia y calidad de hueso, historial dental, posición del implante y disponibilidad de la restauración definitiva.

Tu dentista te informará de todos los posibles escenarios para tu caso antes de la cirugía. Consulte con tu dentista para averiguar si los implantes dentales son adecuados para ti.

