

SimpliShade™

FAMILY



SimpliShade™

UNIVERSAL

**Simplifiez votre flux de travail
avec seulement trois teintes**

Avec seulement 3 nuances, SimpliShade couvre les 16 teintes VITA® classiques. Simplifiez votre gestion de stock, économisez du temps lors du choix de la teinte. Faites en sorte que vos patients gardent le sourire en toute confiance tout en simplifiant votre flux de travail.



SimpliShade™

BULK FILL

Simplification avec une teinte et en une étape

Les restaurations esthétiques ne pourraient être plus simples avec SimpliShade™ Bulk Fill. Evitez la couche de recouvrement grâce à la technique d'obturation en une étape et réduisez les besoins d'inventaire avec une seule teinte pour l'ensemble des 16 teintes classiques VITA®.



SimpliShade™

BULK FILL FLOW

**Quand la simplicité de la teinte unique
rime avec adaptabilité supérieure**

Atteignez toutes les zones de l'anatomie dentaire tout en gagnant du temps avec SimpliShade Bulk Fill Flow. Une seule teinte nécessaire pour correspondre à l'ensemble des 16 teintes VITA® classiques. SimpliShade Bulk Fill Flow s'adapte aisément au fond de la cavité avec une durabilité et une profondeur de polymérisation exceptionnelles.

SimpliShade™ UNIVERSAL

AVEC SEULEMENT TROIS TEINTES

Utilisez SimpliShade en toute confiance dans toutes les classes de cavités sans avoir besoin d'un opaqueur.



Simplifiez la correspondance des teintes

La sélection des teintes est plus facile et plus rapide. SimpliShade couvre les 16 teintes classiques VITA avec seulement 3 nuances : Light, Medium et Dark.



Rationalisez la gestion des stocks

Économisez du temps et de l'argent avec un minimum de nuances pour répondre à presque tous vos besoins. Désencombrez vos étagères, épargnez-vous le fardeau de recommander trop de références différentes et réduisez ou éliminez les produits périmés.



Technologie ART (Adaptive Response Technology)

La technologie ART, grâce à son réseau de nanocharges déjà éprouvé avec le composite HARMONIZE, vous aide à réaliser des restaurations réalistes avec une résistance exceptionnelle et une esthétique inégalée.



Universel pour toutes les classes de cavité

Utilisez SimpliShade en toute confiance dans toutes les classes de cavités sans avoir besoin d'un opaqueur.

SimpliShade Avant & Après

LIGHT



MEDIUM



DARK



Case images courtesy of Dr. Matthew Miller

Guide d'équivalence teintes VITA

A1, B1, B2, C1, D2


A2, A3, C2, D3, D4

A3,5, A4, B3, B4, C3, C4



ART³ : L'OBTURATION EN MASSE REDÉFINIE

Obtenez des restaurations plus vraies que nature grâce à la nouvelle génération de la technologie de réponse adaptative (ART) cliniquement éprouvée à la base des composites Harmonize™ et SimpliShade Universal Composite. Reposant sur la technologie de réponse adaptative améliorée, SimpliShade Bulk Fill permet une manipulation aisée et un faible taux de rétraction.

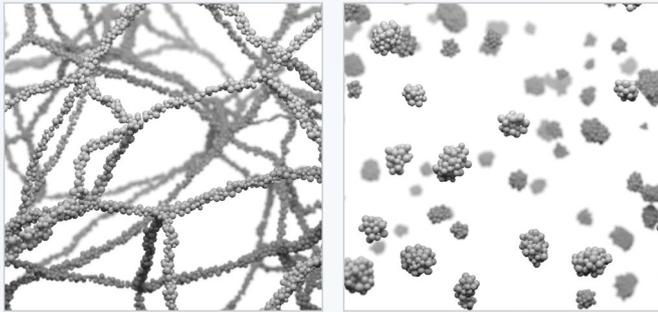


Technologie de réponse rhéologique adaptative pour une facilité de sculptage

ART3 utilise des modificateurs rhéologiques qui réduisent la viscosité du composite au fur et à mesure que vous le manipulez. Une fois la mise en forme achevée, la viscosité est restituée et l'anatomie se stabilise avant la photopolymérisation, ce qui diminue le besoin de reprise de la sculpture.


Technologie d'harmonisation colorimétrique adaptative pour une élégante intégration

Obtenez une intégration exceptionnelle avec des nanocharges spécifiques qui reproduisent les structures amélaire et interagissent avec la lumière de manière naturelle. La restauration et la dent deviennent quasiment indifférenciables.

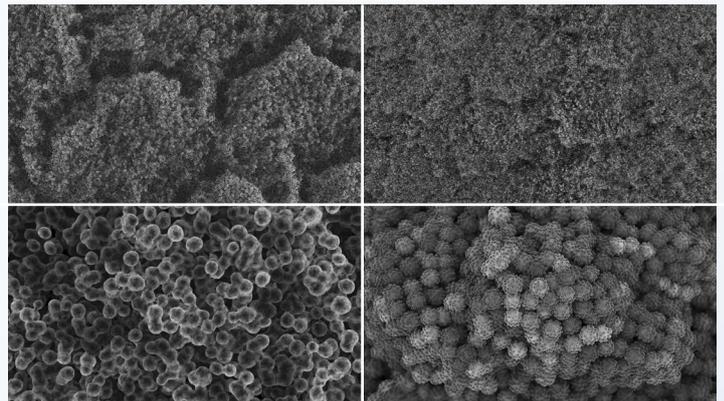

Émail humain

SimpliShade Bulk Fill

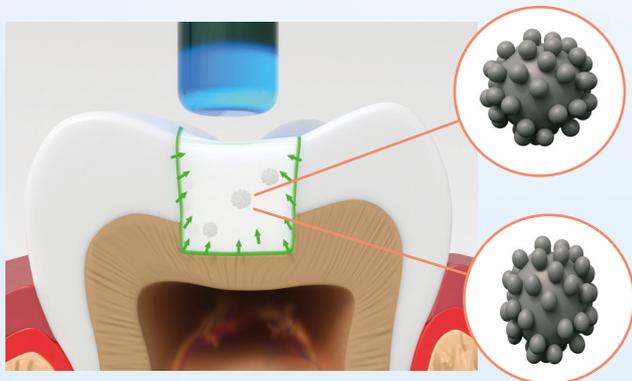

Technologie de réponse adaptative à la contrainte de retrait pour des résultats durables

Au cours de la polymérisation, SimpliShade Bulk Fill intègre une résine à faible taux de rétraction et une composition innovante à base de nanocharges. Ces nanocharges à infusion de résine accélèrent l'élasticité pour une réduction du stress et un revêtement spécial soulageant la contrainte interfaciale. Réunissant trois mécanismes de réduction de la contrainte de retrait, il améliore l'adaptation et l'intégrité marginale par la minimisation de la contrainte que la restauration composite exerce sur la couche adhésive pour une adaptation marginale améliorée.



Découvrez-en plus sur ART³
et l'effet sur contrainte de rétraction.

SimpliShade™ BULK FILL

UNE TEINTE, ET C'EST TOUT

SimpliShade™ Bulk Fill est indiqué pour les restaurations de classe I à V - positionnement direct de restaurations antérieures et postérieures, reconstitutions coronaires et réparation de défauts de restauration.



Système à teinte unique

L'usage d'une teinte qui s'harmonise à la perfection à l'ensemble des 16 teintes classiques VITA®, SimpliShade Bulk Fill vous permet un gain de temps dans la sélection de teintes et la gestion de l'inventaire.



Une étape

Rend superflue toute couche de recouvrement, restaurations complètes avec un composite SingleFill™. Affichant un mécanisme de polymérisation amélioré, SimpliShade Bulk Fill permet d'atteindre aisément des profondeurs de polymérisation allant jusqu'à 5 mm en une étape.



Simplicité et durabilité

SimpliShade Bulk Fill offre un faible taux d'usure, une résistance élevée à la flexion et un stress de rétraction comparable aux autres marques de bulk fill du marché, en gardant vos restaurations plus forte et durable.





Effet caméléon

L'architecture spéciale des nanocharges reproduit la structure amélaire naturelle et interagit avec la lumière pour une harmonisation quasiment indifférenciable.

Résistance à la flexion


Sa valeur de résistance à la flexion et son module de flexion confèrent au SimpliShade Bulk Fill une bonne résistance aux fractures et à l'usure à long terme.

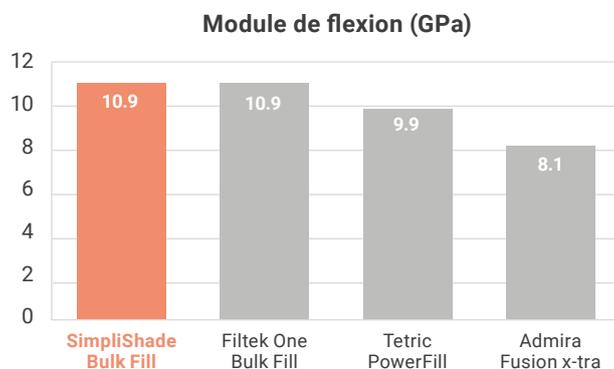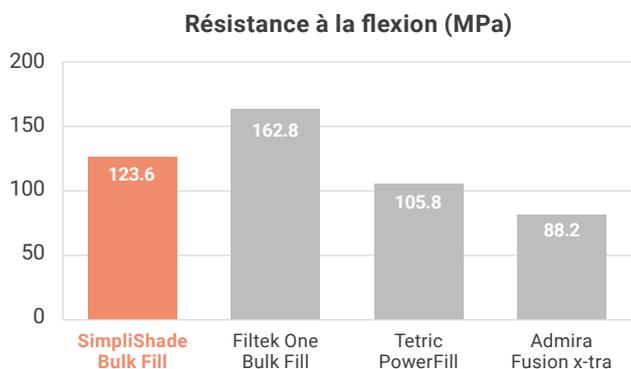

Auteurs : Drs. Jack L. Ferracane et Carmem S. Pfeifer, Oregon Health & Science University, Portland, OR.

Maintien de la brillance

SimpliShade Bulk Fill a le maintien de brillance le plus élevé par rapport à Filtek One Bulk Fill et Admira Fusion x-tra. Cela signifie que le brillant esthétique initial de la restauration est conservé plus longtemps.

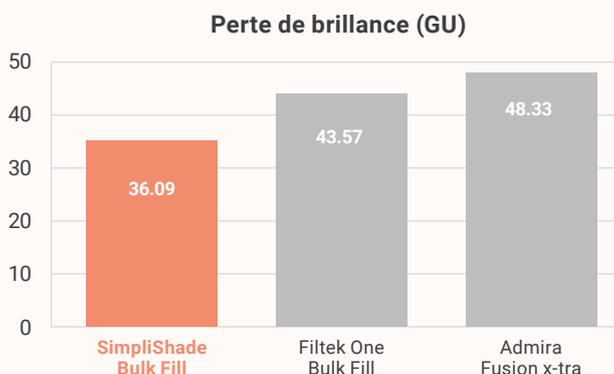

Auteurs : Prof. Dr. Nate Lawson, Université de l'Alabama à Birmingham, Birmingham, AL.

Témoignages de dentistes



“Le SimpliShade Bulk Fill révolutionne mon approche des composites pour les restaurations des molaires et prémolaires. Sa praticité et sa facilité d'utilisation avec des instruments dentaires de base sont inégalées.”

Dr. Maciej Mikołajczyk*
Lodz, Pologne



“SimpliShade Bulk Fill offre une solution trois-en-un avec sa teinte universelle, sa consistance idéale et son excellente adaptabilité pour plus de simplicité et d'efficacité.”

Prof. Joseph Sabbagh*
Bruxelles, Belgique



“Composite d'une consistance idéale qui permet une application et un modelage faciles. Protocole de travail simple et rapide, superbe mimétisme.”

Dr. Dimitar Kosturkov*
Sofia, Bulgarie

SimpliShade™ BULK FILL FLOW

UNE TEINTE, ET C'EST TOUT

SimpliShade™ Bulk Fill Flow est indiqué comme base/fond de cavité sous des restaurations directes de **classe I** et **classe II**, pour le scellement de puits et de fissures, pour la restauration de petites cavités, les restaurations de **classe III** et **classe V**, l'obturation de contre-dépouilles, les petites reconstitutions coronaires et la réparation de restaurations provisoires en résine et acrylique.

Quand fluidité rime avec simplicité monotinte



Système à teinte unique

L'usage d'une teinte qui s'harmonise à la perfection à l'ensemble des 16 teintes classiques VITA® sur les parois de la cavité, SimpliShade Bulk Fill Flow vous permet un gain de temps dans la sélection de teintes et la gestion de votre stock.



Gain de temps

Simplifiez vos procédures en une seule étape pour polymériser jusqu'à 5 mm, avant d'ajouter une couche de recouvrement.



Suivez le mouvement

Obturez chaque zone de l'anatomie dentaire avec un composite bulk fluide autonivellant qui s'adapte aisément au fond de la cavité.



Faible rétraction

La faible rétraction et le stress de rétraction liés à la polymérisation du SimpliShade Bulkfill Flow garantissent des résultats de restauration durables.



Gagner en confiance


Restaurez en toute confiance avec un composite d'obturation bulk fluide qui offre une résistance mécanique comparable ou supérieure à celle des concurrents.



Contrainte de rétraction et stress de polymérisation

En termes de comportement face à la rétraction, il n'y avait pas de différences significatives entre les matériaux testés. Les deux matériaux fluides concurrents, SureFil SDR Flow+ et Filtek Bulk Fill Flow, sont des composites fluides à faible rétraction, une performance similaire du matériau SimpliShade Bulk Fill Flow est donc un résultat souhaitable.

Contrainte de rétraction (N)

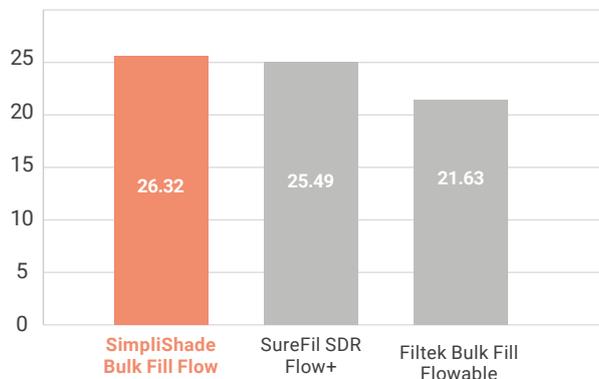


Auteurs : Prof. Dr. Nate Lawson, Université de l'Alabama à Birmingham, Birmingham, AL

Contrainte de polymérisation (MPa)



Auteurs : Drs. Jack L. Ferracane et Carmem S. Pfeifer, Université de la santé et des sciences de l'Oregon, Portland, Oregon

Usure volumétrique (mm³)

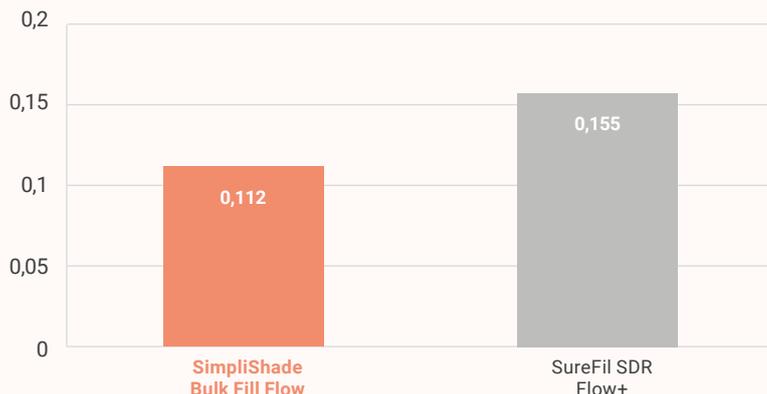

Auteurs : Prof. Dr. Nate Lawson, Université de l'Alabama à Birmingham, Birmingham,

Taux d'usure

SimpliShade Bulk Fill Flow a un taux d'usure plus faible que SureFil SDR Flow+ au niveau des contacts interproximaux, ce qui permet une restauration durable.

Témoignages de dentistes



"Une maniabilité exceptionnelle qui complète parfaitement la technique de restauration en Snow-plow du Styleitaliano."

Prof. Angelo Putignano*
Ancône, Italie



"Un composite bulk fluide impressionnant et innovant avec une grande adaptation marginale, une application rapide, des caractéristiques autonivelantes et à faible taux de rétraction."

Dr. Iulian-Costin Lupu*
Iasi, Roumanie




"Combinaison exceptionnelle d'une bonne maniabilité, d'une faible translucidité et sans bulle d'air dans le composite bulk fluide avec une grande radio-opacité."

Dr. Hossam Kamel*
Alexandrie, Egypte



Usage de composite fluide SimpliShade Bulk Fill Flow et recouvrement avec SimpliShade Bulk Fill

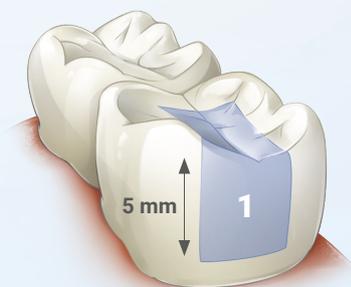

Obturation des cavités de manière simple et sans effort avec SimpliShade Bulk Fill jusqu'à 5 mm.

RESTEZ EN FAMILLE

avec notre gamme complète de produits SimpliShade !

SimpliShade Universal Composite



Unidoses

Ref.	Description
37006	Light - 20 compules
37007	Medium - 20 compules
37008	Dark - 10 compules
37009	Bleach White - 10 compules
37010	Universal Opaque - 10 compules

Seringue

Ref.	Description
37001	Light
37002	Medium
37003	Dark
37004	Bleach White
37005	Universal Opaque



SimpliShade Bulk Fill

Ref.	Description
37211	Seringue SimpliShade Bulk Fill Composite (4g)
37212	20 compules SimpliShade Bulk Fill Composite Unidose (20x0,25g)



SimpliShade Bulk Fill Flow

Ref.	Description
37217	Seringue SimpliShade Bulk Fill Flow (2x2g)
37218	20 compules SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose (20x0,25g)



Pour une finition ultra brillante, optez pour la gamme de polissoirs Kerr !



Une teinte.
Une étape.
La meilleure méthode d'obturation en masse.

Pour plus d'informations, scannez le code QR ou visitez le site to.kerrdental.com/fr/simplishadebulkfill

Dispositif Medical (DM) Classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur ce flyer est fabriqué par la société Kerr - Organisme notifié : 2797 - Mai 2024

EH France SAS | Kerr dental | 45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier | 94200 Ivry Sur Seine
Tél. : 01 48 90 77 77 | www.kerrdental.com/fr-fr/

©2023 Kerr Corporation. Toutes les marques déposées applicables à Kerr/ou ses produits sont la propriété de Kerr Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif. Tous droits réservés. Données internes. MKT-23-1661-FR

Kerr[™]