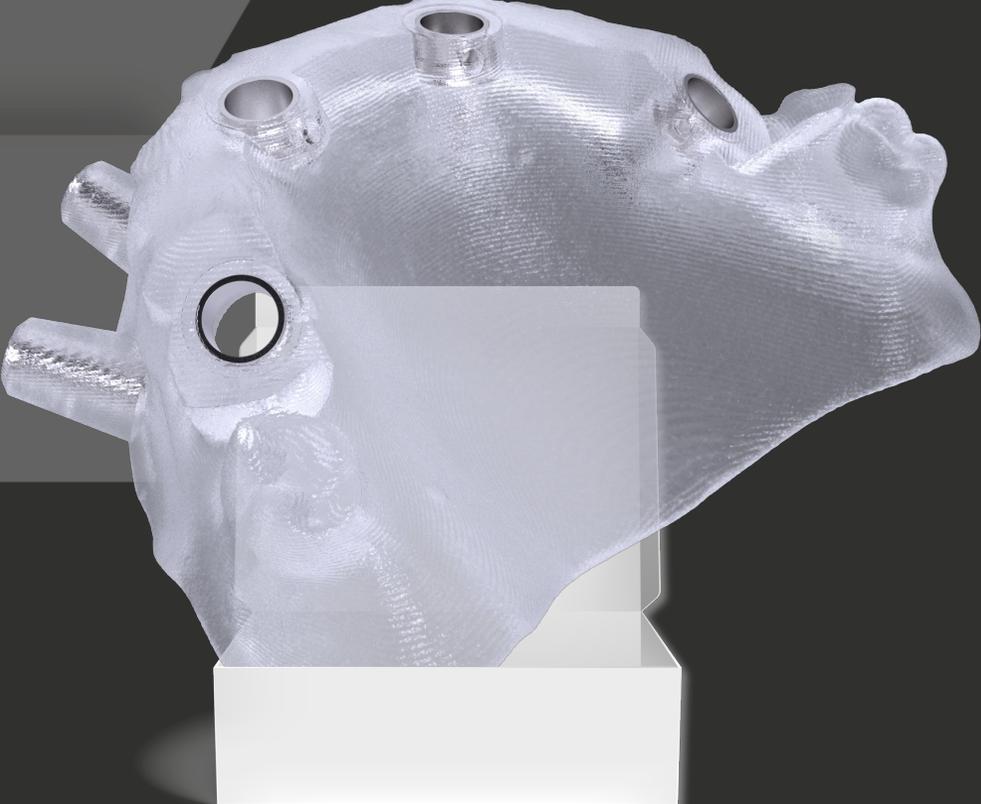
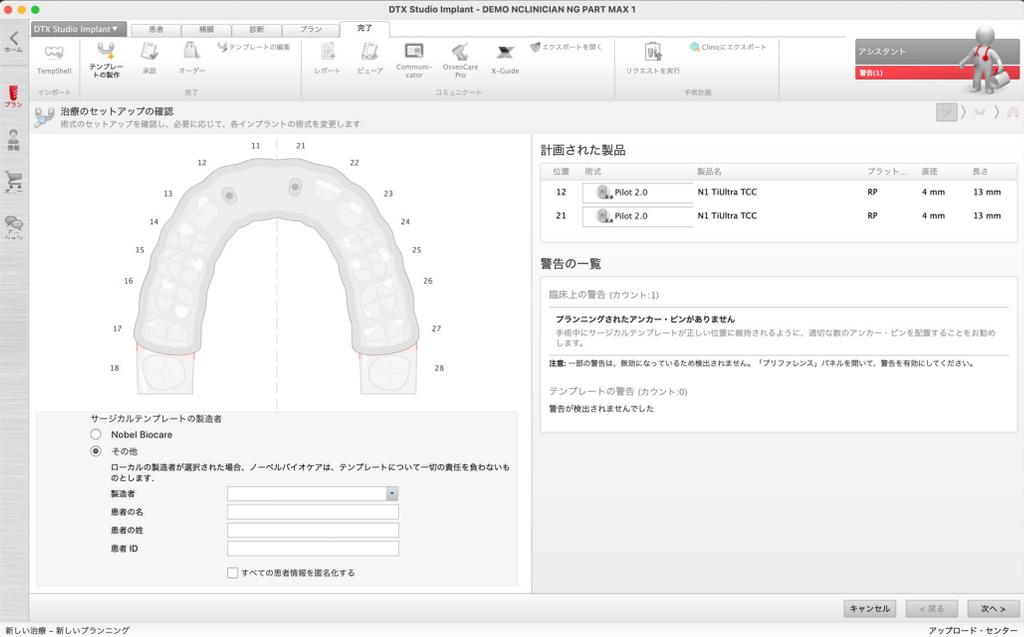


# サージカルテンプレート国内製造

## DTX Studio™ Implant オーダーマニュアル

Supported by NB Production Center

位置	形式	製品名	プラットフォーム	直径	長さ
12	Pilot 2.0	N1 TiUltra TCC	RP	4 mm	13 mm
21	Pilot 2.0	N1 TiUltra TCC	RP	4 mm	13 mm

警告の一覧

臨床上の警告 (カウント:1)

**フランニングされたアンカー・ピンがありません**  
 手続中にサージカルテンプレートが正しい位置に維持されるように、適切な数のアンカー・ピンを配置することをお勧めします。

注意:一部の警告は、無効になっているため検出されません。「プリファレンス」パネルを開いて、警告を有効にしてください。

テンプレートの警告 (カウント:0)  
 警告が検出されませんでした

サージカルテンプレートの製造者

Nobel Biocare

その他

ローカルの製造者が選択された場合、ノーベルバイオケアは、テンプレートについて一切の責任を負わないものとします。

製造者:

患者の名:

患者の姓:

患者 ID:

すべての患者情報を匿名化する

# サージカルテンプレート 作成画面

DTX Studio Implant - DEMO NCLINICIAN NG PART MAX 1

DTX Studio Implant ▼ 患者 補綴 診断 プラン 完了

TempShell テンプレートの製作 承認 オーダー レポート ビューア Communicator OsseoCare Pro X-Guide リクエストを実行

インポート 完了 コミュニケート

アシスタント 警告(1)

治療のセットアップの確認  
術式のセットアップを確認し、必要に応じて、各インプラントの術式を変更します

サージカルテンプレートの製造者

Nobel Biocare

その他

ローカルの製造者が選択された場合、ノーベルバイオケアは、テンプレートについてのとします。

製造者 NB Production Center

患者の名

患者の姓

患者 ID

お客様番号(得意先No)

すべての患者情報を匿名化する

キャンセル < 戻る 次へ >

アップロード・センター

デフォルトではNobel Biocareが選択されています。（=海外製造）


国内製造をご希望の際は、

- ・ 『その他』を選択
- ・ 製造者『NB Production Center』を選択してください。

また、患者ID欄へお客様番号（得意先No）を必ずご入力ください。

お客様番号は納品書等に記載されています。

# サージカルテンプレート 形態確認画面

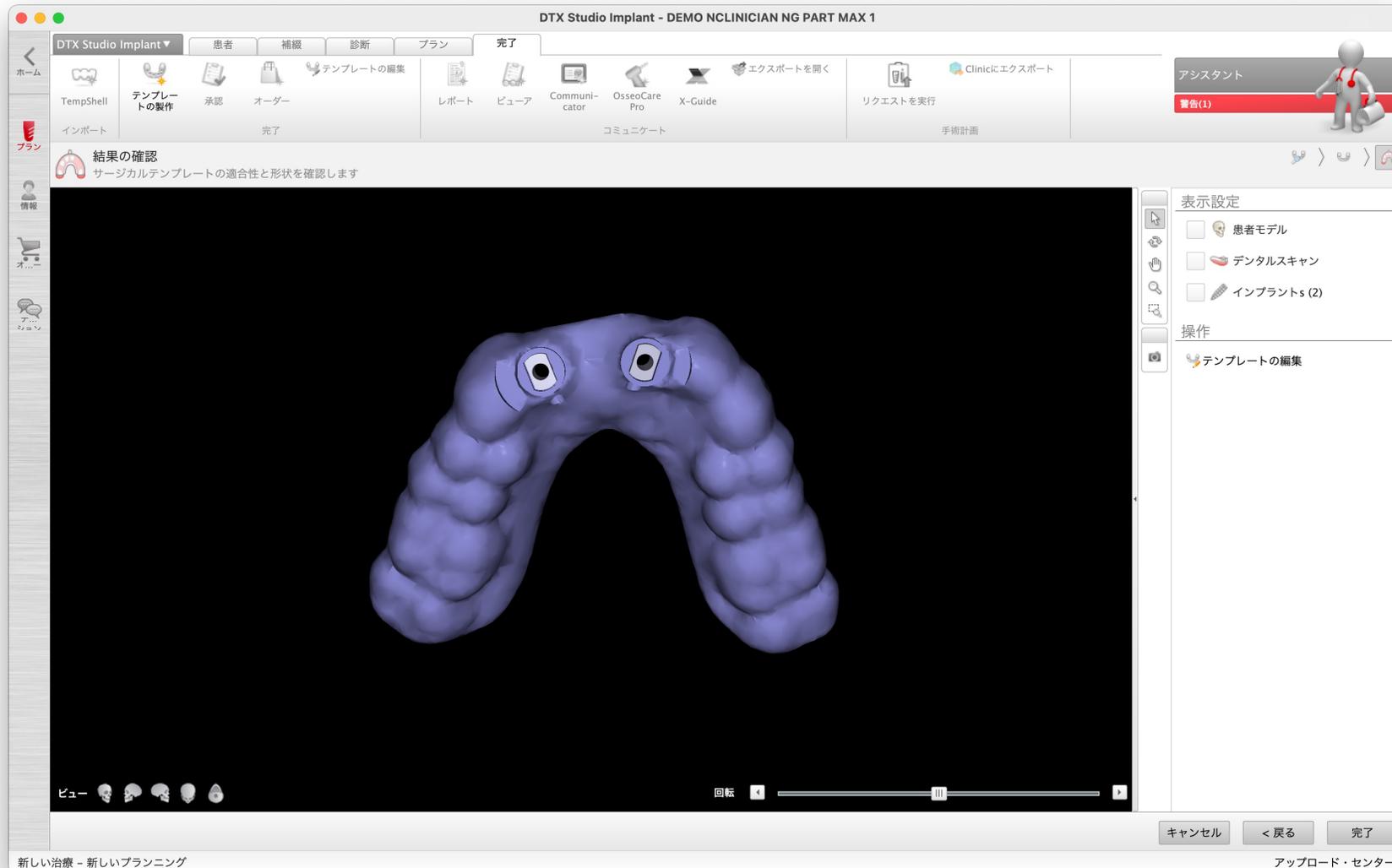

計算後、サージカルテンプレートは  
**紫色**で表示されます。

形態確認とともに**紫色**になっていること  
を確認してください。

# サージカルテンプレート オーダー画面

DTX Studio Implant - DEMO NCLINICIAN NG PART MAX 1

DTX Studio Implant ▼ オーダー

ホーム スキャン LabDesign TempShell 製品 リクエストを実行 編集 送信 ダウンロード レポート アシスタント

プラン 詳細の入力  
オーダーの詳細をすべて入力して、オーダーの製品を確認してください。

オーダーの詳細

送付先: [ ]

発行者: [ ]

製品メモ: 製作上のメモを入力します

オーダーの終了:  保存して今すぐ送信  保存のみ

オーダー済み製品

製品	製品番号	数量	価格
Surgical Template (LP) Pilot Drill 2 implants	CUST75594	1	0.00

合計価格 (送料別): 0.00

キャンセル < 戻る 完了

アップロード・センター

合計価格『0』と表示されますが、実際のご請求価格とは異なります。価格はリーフレットをご覧ください。地域の担当営業、カスタマーサービスまでお問い合わせください。